




Anwendungshinweise für Solvit CareLift™ Tragegeschirr

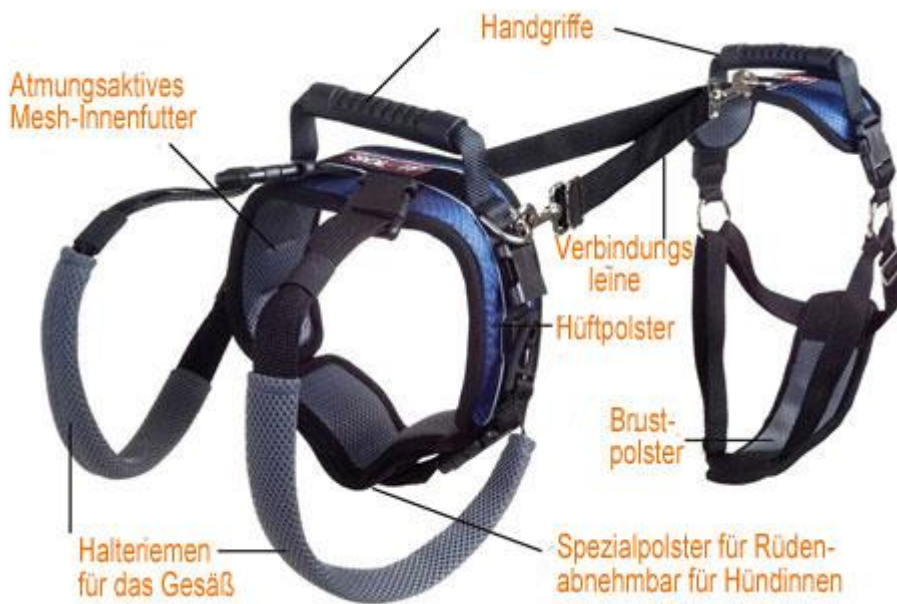

- 1) Als erstes befestigen Sie den hinteren Teil des Geschirres. Bitte öffnen Sie die Plastik-Klickverschlüsse an einer Seite des Hüftpolsters und an den beiden Gesäßriemen. Setzen Sie das Geschirr auf dem Rücken des Hundes auf, ca. 5cm vor dem Rutenansatz. Führen Sie das Hüftpolster unter dem Bauch durch und schließen Sie es auf der anderen Seite. Die Halteriemen führen Sie unter den einzelnen Beinchen durch und befestigen sie wieder am Geschirr. Passen Sie die Länge der Bänder an und kontrollieren Sie den Sitz des Geschirres. Es sollte nicht zu fest, aber auch nicht locker sitzen. Für die Befestigung der Gesäßriemen stehen Ihnen bei Größe M zwei und bei Größe L drei Positionen zur Verfügung. Folgen Sie den Zeichnungen um die Position zu verändern.

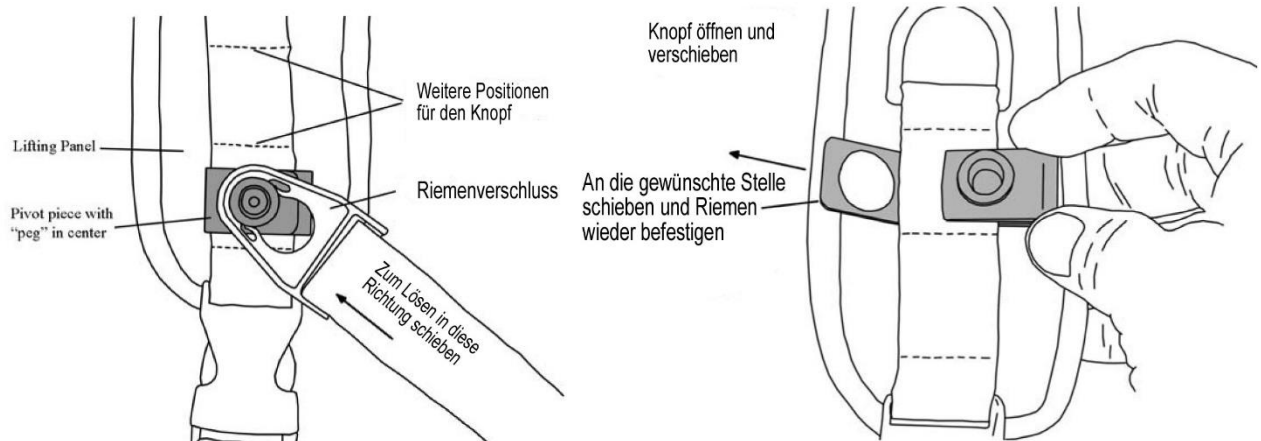

2) Mit dem hinteren Teil kann der Hund durch Heben an der verstellbaren Leine oder dem gummierten Griff unterstützt werden. Die einzigartig gestaltete Heckpartie hebt sowohl mit den Beinschlaufen als auch mit dem Bauchband ab, um das Gewicht gleichmäßiger zu verteilen und Stress auf den Hund zu reduzieren. Bei männlichen Hunden kann das Bauchpolster beim Wasserlassen vorübergehend aus dem Weg gezogen werden - einfach das Bauchband von der linken Schnalle lösen und unter den Hund schwingen und die männliche Schnalle am Ende des Bandes mit der Ersatzmutter verbinden (Siehe Bild rechts). Der Hund kann noch mit den Beinschlaufen angehoben werden, bis das Bauchband wieder eingerastet ist. Das Bauchband ist versehen mit einem speziellen "männlichen Protektor" Stück, das für Hündinnen oder zur Reinigung entfernt werden kann.

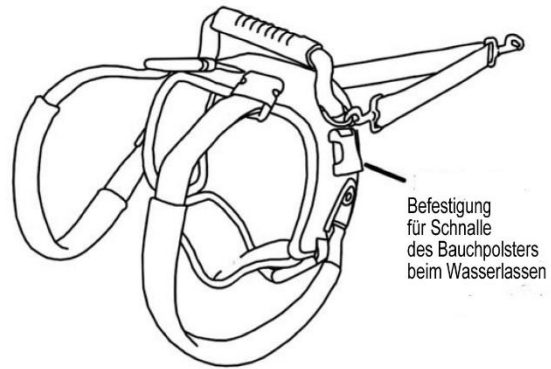

- 3) So stellen Sie das vordere Geschirr auf den Hund ein: Lösen Sie die Plastikschnalle in der Nähe des gummierten Griffs, legen Sie das Brustpaneel auf den Boden und helfen Sie Ihrem Hund, einen "Schritt" in die Öffnungen auf beiden Seiten der Brustplatte zu tun. Heben Sie die Gurte auf beiden Seiten der Brustplatte und legen Sie die Schulterplatte dem Hund auf den Nacken und schließen Sie die Kunststoffschnallen. Der Hund kann nun durch Heben der Heckleine oder durch Verwendung eines der gummierten Griffe unterstützt werden. Bei Nichtgebrauch kann die Heck-Leine an den D-Ring am vorderen Geschirr angeschlossen werden. Wenn die hinteren und vorderen Abschnitte auf diese Weise verbunden sind, kann das Ganzkörper-Tragegeschirr den ganzen Tag (nicht 24x7) belassen werden, wodurch es leicht ist, schnell Hilfe bereitzustellen, wenn dies erforderlich ist. Wenn der vordere Abschnitt nicht installiert ist, sollte der hintere Abschnitt entfernt werden, wenn er nicht verwendet wird.
- 4) Optional: Für schwerere Hunde oder bei langen Strecken sollten Sie den Schultergurt verwenden. Befestigen Sie die Hebeleine von der Frontplatte aus und schließen Sie das Schnappdrehgelenk mit der Leine an einem Ende des Schulterriemens an. Schließen Sie das andere Ende des Schultergurts an den D-Ring an das vordere Geschirr an und passen Sie es an.

ACHTUNG

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihren Hund anheben. Achten Sie auf die Verlagerung des Gewichtes, das den Hund und auch Sie aus dem Gleichgewicht bringen könnte! Achten Sie auf Ihre Grenzen und heben Sie niemals aus dem Rücken, sondern immer aus den Beinen! Sollte Ihr Hund die Tragehilfe oft oder lange tragen müssen, achten Sie bitte auf Druckstellen und/oder Hautirritationen.

Reinigung:

Reinigung: Die Bauchband- und Beinschlaufen sind abnehmbar und maschinenwaschbar. Entfernen Sie das männliche Schutzstück vom Bauchband und waschen Sie es separat in Seifenwasser.

Garantie:

Die gesetzliche Garantie wird auf Material- und Fabrikationsfehler gewährt.